



Desinfektionsplan Tattoo & Piercing

PSP-000689 07/2013

Was	Wann	Womit	Konzentration/ Einwirkzeit	Wie	Wer	
 Haut & Hände Desinfektion	Hygienische Händedesinfektion	Vor und nach jedem Kundenkontakt. Nach Kontakt mit Blut, Sekreten und anderen (potentiell) kontaminierten Materialien. Nach dem Ablegen von Schutzhandschuhen. Bei Bedarf.	DESCODERM ASEPTOMAN ASEPTOMAN PARFÜMFREI	konz. - 30 Sek.	Ausreichende Menge gründlich in die trockenen Hände einreiben. Besondere Berücksichtigung von Hauptkontaktstellen, Fingerspitzen, Daumen und Nagelfalz. Die Hände müssen während der gesamten Applikationszeit durch das konz. Präparat feucht gehalten werden.	Alle Mitarbeiter
	Hautdesinfektion	Vor Beginn der Behandlung.	ASEPTODERM	Talgdrüsenarme Haut: konz. - 1 Min. Talgdrüsenreiche Haut: konz. - 3 Min.	Hautbereich satt einsprühen (im Gesicht mit keimarmen Tupfern auftragen). Mit sterilisiertem Tupfer abwischen. Erneut ansprühen. Einwirkzeit abwarten. Einstichstelle muss während der gesamten Einwirkzeit feucht gehalten werden.	Tätowierer/in
	Schleimhautdesinfektion	Vor Beginn der Behandlung.	Schleimhautdesinfektionsmittel		Schleimhautbereich mit sterilen, getränkten Tupfern unverdünnt abstreichen.	Tätowierer/in
 Haut & Hände Reinigung	Händewaschung	Vor Arbeitsbeginn. Nach Arbeitsende. Nach der Toilettenbenutzung. Wenn die Hände sichtbar verschmutzt oder klebrig sind.	DESCOSOFT SENSITIVE DESCOSAN		Präparat mit lauwarmem Wasser in den Händen aufschäumen und Schmutzreste sowie organische Anschmutzungen gründlich entfernen. Abtrocknen mit Einmaltuch.	Alle Mitarbeiter
	Hand-/Hautpflege	Bei Bedarf.	BIALIND JOBALAN		Hautpflegecreme auf die trockenen Hände auftragen und gründlich einmassieren.	Alle Mitarbeiter
 Haut & Hände Pflege	Hautschutz	Bei Bedarf.	DESOLIND PROTECT <i>prolind</i> <i>Hautschutzcreme</i>		Hautschutzcreme in die trockenen Hände einschließlich Fingerzwischenräume, Handgelenk und Nagelbetten gründlich einreiben.	Alle Mitarbeiter
	 Instrumente	Instrumente	Nach Gebrauch. Eine Risikobewertung der aufzubereitenden Medizinprodukte ist durchzuführen.	DESCOTON EXTRA PERFEKTAN TB	2 % - 30 Min. 1 % - 60 Min.	Instrumente direkt nach Gebrauch in Anwendungslösung einlegen, auf vollständige Benetzung achten. Nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. mechanisch reinigen, unter fließendem Wasser abspülen, trocknen. Ggf. der Sterilisation zuführen. Herstellerrichtlinien beachten!
 Fläche		Arbeitsflächen Ablageflächen	Arbeitstäglich. Sofort nach Kontamination. Bei Bedarf.	DESCOCEPT SPEZIAL WIPES	konz. - 1 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.
	Behandlungsstuhl Behandlungsliege kundennahe Flächen	Vor jedem neuen Kunden.	DESCOCEPT SPEZIAL WIPES	konz. - 1 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Tätowierer/in
	Geräte	Nach Gebrauch.	DESCOCEPT SPEZIAL WIPES	konz. - 1 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Tätowierer/in
	Inventar	Nach Kontamination. Bei Bedarf.	DESCOCEPT SPEZIAL WIPES	konz. - 1 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeiter
	Sanitärbereich	Nach Kontamination. Bei Bedarf.	DESCOCEPT SPEZIAL WIPES OPTISAL N	konz. - 1 Min. 0,5 % - 60 Min. 1 % - 15 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeiter
	Fußboden	Nach Kontamination. Bei Bedarf.	OPTISAL N	0,5 % - 60 Min. 1 % - 15 Min.	Fläche vollständig mit Desinfektionsmittel benetzen und abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeiter
Sonstiges	Arbeitskleidung	Arbeitstäglicher Wechsel.	THERMOTON WASHTEX		Von Privatkleidung getrennt aufbewahren. Desinfizierendes Waschverfahren.	Alle Mitarbeiter
	Schutzkleidung: Chemikaliendichte Schutzhandschuhe Einmalhandschuhe	Vor dem Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Vor allen Eingriffen, bei denen ein Kontakt mit Blut, Sekreten vorhersehbar ist. Bei Bedarf.			Nach Gebrauch entsorgen.	Alle Mitarbeiter
	Wäsche, z. B. Handtücher, Auflagen von Liegen, Abdecktücher	Nach jeder Benutzung.	THERMOTON WASHTEX		Wäsche in geeigneten Behältnissen sammeln und bei mind. 60 °C waschen. Bei Kontamination mit Blut und Sekreten, desinfizierendes Waschmittel einsetzen.	Alle Mitarbeiter
	Abfälle				Abfälle in gut verschließbaren Behältnissen sammeln und mindestens einmal täglich entsorgen. Abfalleimer bei Bedarf desinfizieren. Spitze, scharfe und zerbrechliche Gegenstände dürfen nur sicher umschlossen in den Abfall gegeben werden.	Alle Mitarbeiter

Bei Desinfektionsmaßnahmen sind Konzentration und Einwirkzeit zu beachten.
Desinfektionslösungen sind immer mit kaltem Wasser anzusetzen.
Beim Umgang mit Desinfektionsmitteln, die nicht für die Anwendung am menschlichen Körper vorgesehen sind, sind Schutzhandschuhe zu tragen.
Die Überprüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit liegt beim Anwender.

Dr. Schumacher GmbH

Am Roggenfeld 3, D-34323 Malsfeld

Telefon: +49 5664 9496-0

Email: post@schumacher-online.com

www.schumacher-online.com

Stempel/Unterschrift